

ACUVUE®
OASYS™ BRAND CONTACT LENSES
with HYDRACLEAR® Plus

ACUVUE®
OASYS™ BRAND CONTACT LENSES
FOR ASTIGMATISM
with HYDRACLEAR® Plus

Guida all'utilizzo delle lenti a contatto
ad uso giornaliero e prolungato



Manuale d'istruzione
ad uso del portatore

Johnson & Johnson Vision Care

CE0086

I simboli che seguono possono comparire sulle etichette o sulle confezioni di lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus con UV-blocker:

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Vedere il foglio delle istruzioni	D	Diottria (gradazione lente)
	Data di scadenza	CE 0086	Simbolo della certificazione di qualità
	Codice lotto	 	Filtro UV
	Sterile utilizzando vapore o calore evaporativo		Tasse di riciclaggio pagate
DIA	Diametro		Pellicola da sollevare
BC	Curva base		ATTENZIONE: la legge americana permette che questo dispositivo medico sia venduto solo da uno specialista abilitato.

Colorazione per visibilità:

	Orientazione corretta della lente		Lente girata al rovescio
--	-----------------------------------	---	--------------------------

ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus

CYL	Cylinder Power
AXIS	Axis

Le lenti a contatto a marchio ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus

Sicure, confortevoli, pratiche

Congratulazioni per la vostra scelta delle lenti ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus della Johnson & Johnson Vision Care, marchio leader nella produzione di lenti a contatto a livello mondiale. Le lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus sono morbide, sottili e flessibili. Questo le rende immediatamente confortevoli e permette il passaggio dell'ossigeno alla

superficie dei vostri occhi, aiutandoli a rimanere freschi e sani. Offrono inoltre una protezione contro i raggi ultravioletti UV.

Per consentirne un uso ed una manutenzione più semplici, le lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus hanno una tenue colorazione che le rende visibili ed un segno indicatore.

La creazione di una lente a contatto avente la qualità di ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus ed un costo sufficientemente basso da permettere una sostituzione regolare delle lenti, ha rappresentato una conquista nella tecnologia industriale di questo settore. Questo equivale a dire che potrete sostituire le vostre lenti *prima che* i depositi e l'usura ne riducano la performance, e non *in conseguenza* a questo fatto.

In questo modo preserverete eccellenti livelli di confort, visione e benessere ogni giorno. Poiché ogni lente viene prodotta in modo identico, proverete lo stesso confort e la stessa visione ottimale lente dopo lente dopo lente.

Come tutte le lenti a contatto, le ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus sono un dispositivo medico. Controlli regolari presso uno specialista sono essenziali per proteggere a lungo termine la salute e la vista dei vostri occhi.

Lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus - per un uso giornaliero e prolungato, come consigliato dal vostro specialista. Togliete le vostre lenti, pulitele, sciacquatele e disinfettatele ogni volta che togliete utilizzando esclusivamente un sistema chimico di disinfezione. Seguite sempre il programma di sostituzione ed uso raccomandato dal vostro specialista.

Le lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus aiutano a proteggere l'occhio e la cornea contro la trasmissione dannosa dei raggi UV*.

*ATTENZIONE: le lenti a contatto ad assorbimento degli ultravioletti NON sostituiscono altri strumenti ottici di protezione ad assorbimento UV come gli occhiali di protezione o gli occhiali da sole, in quanto non coprono completamente l'occhio e l'area circostante. Dovrete quindi continuare ad utilizzare tali strumenti, come vi è stato indicato.

Nota:

Un'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti è uno dei fattori di rischio associati alla cataratta. L'esposizione si basa su una quantità di fattori, quali condizioni ambientali (altitudine, geografia, copertura nuvolosa) e fattori personali (intensità e natura delle attività all'aperto). Le lenti a contatto UV-bloccanti aiutano a fornire una protezione contro gli effetti dannosi dei raggi ultravioletti. Tuttavia, non sono ancora stati effettuati studi clinici che dimostrino che l'uso di lenti a contatto UV-bloccanti riduca il rischio di cataratta o di altri disturbi oculari. Consultate il vostro specialista di fiducia per informazioni più approfondite.

Avvertenze - cosa dovete sapere in merito all'uso delle lenti a contatto

È indispensabile seguire le indicazioni del vostro specialista di fiducia per un uso ed una cura corretti delle lenti a contatto e dei prodotti destinati alla loro manutenzione, compreso l'apposito contenitore. Eventuali problemi nell'uso delle lenti a contatto o dei prodotti specifici per la loro manutenzione possono tradursi in gravi danni agli occhi.

In rare occasioni, si sono verificati problemi oculari quali ulcere corneali, che possono portare ad una perdita della vista. I risultati di uno studio effettuato¹ hanno evidenziato quanto segue:

- Su 10.000 portatori di lenti a contatto, l'incidenza totale annuale delle cheratiti ulcerative (ulcera corneale) su coloro che ne fanno un uso giornaliero viene stimata a circa 4,1 e sale a 20,9 per coloro che ne fanno un uso prolungato.
- Il rischio di cheratiti ulcerative per chi fa un uso prolungato delle lenti a contatto è da 4 a 5 volte superiore rispetto a chi ne fa un uso giornaliero.
- Escludendo dal raffronto i portatori "giornalieri" di lenti a contatto che fanno un uso notturno delle loro lenti ed i portatori "prolungati" che fanno un uso giornaliero delle loro lenti, il rischio tra i portatori ad uso prolungato è da 10 a 15 volte superiore.
- Il rischio tra i portatori di lenti a contatto ad uso prolungato aumenta in proporzione al numero di giorni consecutivi in cui le lenti vengono indossate senza essere tolte, partendo dal primo uso notturno.
- Il rischio di cheratiti ulcerative tra portatori di lenti a contatto che fumano è stimato essere da 3 a 8 volte superiore rispetto ai non fumatori.
- Il rischio totale di cheratiti ulcerative può essere ridotto seguendo attentamente le indicazioni per una buona igiene e manutenzione delle lenti e dell'apposito contenitore.

Una routine di pulizia

Preparare le lenti all'uso

La pulizia è il primo e più importante aspetto di una corretta cura delle lenti a contatto.

Stabilite una routine d'igiene per i momenti in cui toccate le vostre lenti.

Lavate sempre accuratamente le mani con un sapone neutro, sciacquatele abbondantemente ed asciugatele con una salvietta che non lasci pelucchi, prima di toccare le lenti.

Non usate cosmetici oleosi, saponi contenenti creme emollienti, lozioni o idratanti prima di maneggiare le lenti. E' meglio inserire le lenti prima di procedere al trucco. I cosmetici a base d'acqua sono potenzialmente meno dannosi per le lenti di quanto lo siano i prodotti a base grassa.

Tenete chiusi gli occhi mentre utilizzate lacche o altri prodotti spray.

Chiedete il consiglio di un ottico professionista in merito all'uso delle lenti durante attività sportive quali il nuoto ed altri sport acquatici.

Seguite sempre le istruzioni riportate in questo libretto ed ogni indicazione fornita dal vostro specialista per una corretta manipolazione, inserimento, rimozione, pulizia, disinfezione, conservazione ed uso delle vostre lenti.

Non indossate mai le lenti per un periodo di tempo superiore a quello prescritto.

La confezione delle lenti

Per aprire l'astuccio, tirare la linguetta anteriore verso l'alto. All'interno le lenti sono conservate in confezioni individuali sterili. Ripiegare la linguetta per chiudere. **NON UTILIZZARE** le lenti se il blister sterile è aperto o danneggiato.

Per aprire una confezione singola di lenti:

1. Scuotere la confezione per permettere alle lenti di galleggiare liberamente nella soluzione.
2. Tirare indietro la pellicola. Toccare delicatamente la lente con la punta del vostro dito facendo attenzione a non danneggiarla con le unghie. E' preferibile tenerle lisce e corte.
3. Prelevare delicatamente la lente facendola scivolare lateralmente nel contenitore. Non utilizzare pinzette o altri strumenti.

Indossare le vostre lenti

Per evitare confusione, prendete l'abitudine di inserire per prima la lente dell'occhio destro.

Prima di inserire la lente, controllate che sia priva di graffi o lacerazioni. Se è danneggiata, gettatela ed utilizzate un'altra lente.

Controllate che la lente non sia girata al rovescio.

Posizionate la lente sulla punta del vostro dito indice e tenetela al di sopra del livello dell'occhio: in questo modo potrete vedere la parte concava della lente verso l'esterno.


Per lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus



Nota: Se avete bisogno di sciacquare le lenti prima di metterle, utilizzate solo soluzione sterile fresca come indicato dal vostro specialista. NON USATE MAI ACQUA DI RUBINETTO.

Inserire la lente nell'occhio

1. Ricordatevi di iniziare con l'occhio destro. Una volta che avete esaminato la lente e che vi siete assicurati che non sia girata al contrario, mettetela sulla punta del vostro dito indice.
2. Avvicinate il dito medio della stessa mano alle vostre ciglia inferiori ed abbassate la palpebra inferiore.

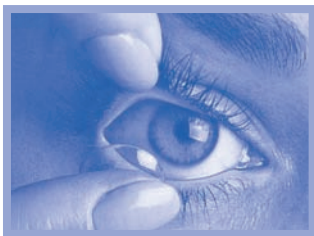

3. Usate il dito indice o medio dell'altra mano per sollevare la palpebra superiore e appoggiare la lente sulla superficie dell'occhio.
 4. Rilasciare delicatamente entrambe le palpebre e sbatterle.
 5. Ripetere questi passi per la lente sinistra.
- Vi sono altri metodi per inserire le lenti. Se quello spiegato sopra vi risulta difficoltoso da eseguire, il vostro specialista può indicarvene uno alternativo.

Centrare la lente

Di norma, una volta inserita, la lente si sistema automaticamente da sola nella parte centrale del vostro occhio ed accadrà raramente che si sposti nella sclera (parte bianca) dell'occhio durante l'uso. Tuttavia, questo può succedere se l'inserimento e la rimozione non vengono eseguiti in modo corretto.

Per centrare la lente, seguite uno di questi metodi:

- Chiudete le palpebre e massaggiare con delicatezza la lente verso il suo posto attraverso la palpebra chiusa.
- Oppure: spostate con delicatezza la lente che si trova fuori posto verso la parte centrale del vostro occhio tenendolo aperto, facendo una leggera pressione con il dito sul margine della palpebra inferiore o superiore.

Nota:

Se la vostra vista appare sfocata dopo aver inserito la lente, controllare quanto segue:

- La lente potrebbe non essere centrata, seguite le istruzioni riportate sopra.
- Se la lente è in posizione corretta, rimuoverla ed esaminare:
 - a. L'eventuale presenza di cosmetici o sostanze grasse sulla lente. Eliminare la lente ed inserire una nuova.
 - b. La lente potrebbe trovarsi nell'occhio sbagliato.
 - c. La lente potrebbe essere a rovescio, e risultare quindi meno confortevole del normale.

Cosa fare se la lente aderisce all'occhio (assenza di mobilità)

Se una lente aderisce all'occhio, il vostro specialista potrebbe prescrivervi l'uso di una soluzione lubrificante o imbibente. In questo modo potrete lubrificare le vostre lenti durante l'uso, per renderle più confortevoli.

Applicate poche gocce ed attendete che la lente ricominci a muoversi liberamente sulla superficie oculare. Se il problema non dovesse risolversi in questo modo, consultate IMMEDIATAMENTE il vostro specialista.

Togliere la lente

Rimuovere sempre la stessa lente per prima.

Lavate, sciacquate ed asciugate con cura le vostre mani e seguite le stesse norme igieniche precedentemente descritte in "una routine di pulizia".

Attenzione: Assicuratevi sempre che la lente si trovi al centro del vostro occhio prima di cercare di rimuoverla.

Potete accertarvene coprendo l'altro occhio e, se la visione è sfocata, significa che la lente si trova sulla sclera dell'occhio o non perfettamente centrata. Per localizzare la lente, ispezionate la parte superiore dell'occhio guardando dentro uno specchio e, nello stesso tempo, alzando la palpebra superiore.

Ispezionate la parte inferiore abbassando la palpebra inferiore.

Localizzata la lente, potete rimuoverla usando il Metodo a Pizzico o qualunque altro metodo consigliato dal vostro specialista.

Il Metodo a Pizzico

1. Guardando verso l'altro, fate scivolare la lente in basso verso la sclera del vostro occhio usando il dito indice.
2. Pizzicate delicatamente la lente tra il pollice e l'indice e rimuovetela.



Cura delle lenti

Per continuare ad utilizzare le vostre lenti in modo sicuro e confortevole, è importante seguire le istruzioni che vi ha fornito il vostro specialista. Se togliete le lenti e pensate di doverle rimettere, leggete attentamente le istruzioni relative ad una corretta pulizia, risciacquo, disinfezione e conservazione.

L'inosservanza di una corretta procedura di manutenzione delle lenti può provocare lo sviluppo di seri problemi all'occhio, come descritti nella sezione "Cosa dovete sapere in merito all'uso delle lenti a contatto".

La pulizia ed il risciacquo sono essenziali per rimuovere muco, secrezioni e depositi che possono essersi accumulati sulla lente durante l'uso. Fatelo subito dopo aver tolto la lente e prima della sua disinfezione. I germi dannosi possono essere rimossi unicamente mediante la pulizia, il risciacquo e la disinfezione. Seguite le istruzioni per l'uso del sistema di manutenzione delle lenti che vi è stato consigliato dal vostro specialista. Se usate un sistema che utilizza perossido di idrogeno, dovrete anche neutralizzare le vostre lenti.

- Lavate, sciacquate ed asciugate sempre le vostre mani prima di toccare le lenti.
- Utilizzate soluzioni fresche e non scadute per la cura delle lenti.
- I sistemi termici che utilizzano il calore possono danneggiare le vostre lenti.
- Non conservate MAI le vostre lenti nella sola soluzione salina. La soluzione salina non proteggerà le lenti dalla contaminazione e questo potrebbe provocare un'infezione all'occhio.
- Non utilizzate MAI le soluzioni consigliate solo per le lenti rigide tradizionali.
- Poiché il materiale di questa lente contiene silicone, la capacità imbibente può variare a seconda dei prodotti utilizzati per la cura delle lenti. Il vostro specialista dovrebbe consigliarvi un sistema appropriato per le lenti ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus.
- Non mettete MAI le lenti in bocca, e utilizzate unicamente le soluzioni apposite per lubrificare o umettare le vostre lenti.

- Non sciacquatele MAI con l'acqua di rubinetto, perché può contenere impurità in grado di contaminare o danneggiare le vostre lenti e provocare quindi infezioni o lesioni.
- Pulite prima la lente destra, al fine di evitare ogni possibile confusione.
- Mettete ogni lente nella corretta vaschetta del sistema di conservazione ed accertatevi che le lenti siano completamente immerse nella soluzione di conservazione quando non vengono utilizzate. Se le lenti non vengono utilizzate per un lungo periodo, possono asciugarsi e diventare fragili. Se questo dovesse accadere, gettatele.
- Non riutilizzate MAI la soluzione nel contenitore delle lenti.
- Chiedete consiglio al vostro specialista se pensate di dover conservare le lenti per lunghi periodi senza utilizzarle.

Manutenzione del vostro contenitore per le lenti

Poiché il contenitore per le lenti può essere una fonte di batteri, dopo l'uso esso dev'essere svuotato, pulito e risciacquato con le soluzioni sterili apposite e lasciato asciugare. Il contenitore delle vostre lenti dovrebbe essere sostituito con regolarità, come consigliato dal produttore delle lenti o dal vostro specialista.

NON UTILIZZATE MAI ACQUA DI RUBINETTO PER SCIACQUARE IL CONTENITORE DELLE VOSTRE LENTI.

Istruzioni per la monovisione

Se il vostro specialista vi prescrive la monovisione, dovete tener presente quanto segue. Come con qualunque correzione mediante lente a contatto, può esservi un compromesso visivo che può comprendere una ridotta acutezza visiva. Alcuni portatori di lenti a contatto per la monovisione hanno sperimentato una ridotta percezione della profondità. Vi sono dei pazienti che hanno difficoltà ad adattarvisi.

Sintomi quali leggeri annebbiamenti e variazioni nella capacità visiva possono avere una durata breve o di diverse settimane, a seconda delle capacità di adattamento dei vostri occhi. Più a lungo perdureranno questi sintomi, minori saranno le vostre possibilità di raggiungere un adattamento positivo.

Durante questo periodo, è consigliabile indossare le lenti solo in situazioni a voi familiari che non siano impegnative dal punto di vista visivo. Per esempio, fino a quando i vostri occhi non si saranno adattati, sarebbe preferibile evitare di mettersi alla guida.

Alcuni pazienti possono aver bisogno di indossare gli occhiali sopra alle lenti per avere una visione più chiara possibile atta ad affrontare compiti particolari.

- In alcuni casi, i pazienti non si troveranno mai completamente a loro agio in condizioni di scarsa luminosità, come per esempio nella guida durante le ore notturne. In questi casi, potrà esservi prescritto l'uso di lenti addizionali in modo tale che entrambi gli occhi abbiano la giusta correzione quando è necessaria una visione nitida a distanza.
- La decisione di idoneità alla monovisione dovrebbe sempre essere presa dietro indicazione di uno specialista.

- Seguite i consigli che vi vengono dati per aiutare il vostro adattamento alla monovisione e discutete sempre con il vostro specialista ogni questione o problema che dovesse sorgere durante e dopo il periodo di adattamento.

Controllo di sicurezza

Dovreste effettuare un semplice autoesame almeno una volta al giorno.

Chiedetevi:

1. Come sento le lenti nei miei occhi?
2. Come appaiono i miei occhi?
3. Continuo a vedere bene?

Rimuovete immediatamente le vostre lenti se incontrate uno dei seguenti problemi:

- Prurito, bruciore o irritazione agli occhi.
- La sensazione di un corpo estraneo nell'occhio.
- Eccessiva lacrimazione, secrezioni oculari insolite o rossore.
- Visione sfocata, arcobaleno di colori o aloni attorno agli oggetti. Si può verificare secchezza degli occhi se le vostre lenti vengono lubrificate continuamente o troppo a lungo.
- Le lenti sembrano essere meno confortevoli di quando le avete messe la prima volta.

Se il fastidio o i problemi hanno termine quando levate le lenti, esaminatene da vicino per verificare che non presentino danni, sporcizia o un corpo estraneo. Eliminare la lente ed inserirne una nuova. Se i problemi persistono, rimuovere la lente nuova e consultare immediatamente il vostro specialista.

La presenza di uno dei sintomi descritti sopra può essere indice di un disturbo serio come un'infezione o un'ulcera corneale. In questi casi, una diagnosi ed un trattamento tempestivi sono essenziali per evitare l'insorgere di gravi danni ai vostri occhi.

RICORDATE: I SINTOMI SONO SEGNALI DI AVVERTIMENTO. NEL DUBBIO, ELIMINATELI.

Altre importanti informazioni

Precauzioni

- Prima di lasciare il vostro ottico, assicuratevi di essere in grado di togliervi le lenti da soli.
- Toglietevi immediatamente le lenti se i vostri occhi si arrossano o si irritano.
- Informate il vostro dottore di essere un portatore di lenti a contatto.
- Chiedete sempre consiglio al vostro specialista prima di utilizzare un qualunque tipo di collirio.
- Alcuni medicinali, come gli antistaminici, i decongestionanti, i diuretici, i farmaci anti-spastici, i tranquillanti o i trattamenti per la chinetosi possono causare secchezza all'occhio, un aumento della percezione della lente o una visione sfocata. In questi casi, chiedete un apposito consiglio medico.

- Nel caso in cui sostanze chimiche entrino a contatto con i vostri occhi: SCIA-QUATE ABBONDANTEMENTE I VOSTRI OCCHI CON ACQUA DI RUBINETTO. CONTATTATE IMMEDIATAMENTE IL VOSTRO SPECIALISTA O RECA TEVI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL PIU' VICINO OSPEDALE.
- Chi usa contraccettivi orali può essere soggetto a cambiamenti nella vista o nella tolleranza alle lenti. Il vostro specialista vi consiglierà in merito a tale problema.
- Come con qualunque tipo di lente a contatto, è necessario sottoporsi a controlli regolari della vista per mantenere gli occhi in buona salute.
- Non permettete mai a nessuno di indossare le vostre lenti. Esse sono state prescritte specificatamente per i vostri occhi e per correggere la vostra vista con la gradazione necessaria. L'uso condiviso delle lenti aumenta fortemente la possibilità di infezioni oculari.
- Per una visione ottimale e confortevole, è importante che le lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus vengano utilizzate solo secondo le indicazioni fornitevi dal vostro specialista e osservando le istruzioni per l'uso, la sostituzione e la cura delle vostre lenti. Questo libretto ha una funzione di promemoria di tali istruzioni.
- Il vostro specialista dovrebbe essere sempre informato della vostra storia medica al fine di consigliarvi un tipo di lente ed un relativo sistema di manutenzione specifico per le vostre necessità.
- Quando il termine di sostituzione prescritto dal vostro specialista è scaduto, le lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus devono essere eliminate e sostituite con un nuovo paio sterile.
- Chiedete consiglio al vostro specialista in merito all'uso delle lenti durante il nuoto o gli altri sport acquatici. Esporre le lenti all'acqua durante il nuoto o un bagno caldo in piscina o al mare, può aumentare il rischio di infezioni oculari da parte di microrganismi.
- Evitate l'esposizione a fumi o vapori nocivi o irritanti durante l'uso delle lenti.
- Informate sempre il vostro datore di lavoro di essere un portatore di lenti a contatto. Alcune professioni richiedono l'uso di equipaggiamenti di protezione per gli occhi o l'impossibilità dell'uso di lenti a contatto.
- Se avete dei dubbi o delle domande, contattate sempre il vostro specialista.

Panoramica sintetica

Come per tutti i tipi di lenti a contatto, vi sono delle indicazioni generiche che devono essere seguite per proteggere e rafforzare la vostra vista.

- Seguite sempre le istruzioni che vi sono state fornite per un uso sicuro delle lenti. E' importante sottoporsi a controlli regolari per conservare un rendimento ed una visione ottimali.
- Sono essenziali alti standard di igiene.

- Non indossate MAI le lenti per periodi più lunghi di quelli prescritti.
- La PULIZIA, RISCIAQUO E DISINFEZIONE sono ESSENZIALI ogni qualvolta la lente viene tolta o inserita.
- Non utilizzate MAI due volte la stessa soluzione nel vostro contenitore delle lenti. Usate soluzione fresca ogni volta che togliete le lenti.
- Non utilizzate MAI acqua del rubinetto per sciacquare le lenti o il loro contenitore.
- In caso di problemi quali arrossamento o irritazione o visione sfocata, rimuovete IMMEDIATAMENTE le lenti e contattate il vostro specialista.
- Tenete sempre a portata di mano un paio di occhiali in modo tale da non essere tentati di usare le vostre lenti quando non dovrete. Anche nel caso in cui le lenti a contatto siano il vostro strumento ottico preferito, gli occhiali rappresentano comunque un supporto essenziale.

Come portatori delle lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus, vi renderete presto conto dei loro vantaggi rispetto agli occhiali o ad altri tipi di lenti a contatto.

Per ottenere un rendimento ed un beneficio ottimali, è indispensabile che vi rendiate conto di quanto sia importante l'osservanza di queste linee-guida.

E' fondamentale che utilizzate le vostre lenti solo dopo aver seguito i consigli del vostro specialista e le indicazioni fornite in questo libretto.

Effetti indesiderati

Qualunque effetto indesiderato che dovesse verificarsi durante l'uso delle lenti a contatto ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus e ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® Plus dovrà essere riferito al vostro specialista.

Rappresentante Autorizzato EU:
Johnson & Johnson Vision Care,
Divisione della Johnson & Johnson Medical Limited,
The Braccans, London Road, Bracknell, Berkshire RG12 2AT

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS™ e HYDRACLEAR®
sono marchi della Johnson & Johnson Vision Care.
©JJVC 2005 divisione della Johnson & Johnson Medical Ltd, UK.

FEB05POS03

¹ New England Journal of Medicine, 21 settembre 1989



Johnson & Johnson Vision Care

Una divisione della **Johnson & Johnson**
MEDICAL SpA

Via del Mare, 56
00040 Pratica di Mare - Pomezia (RM)

Mi è stata descritta la gamma dei vari tipi di lenti a contatto e mi sono stati spiegati i prospetti per l'uso delle lenti.

Ho letto quanto precede e accetto la responsabilità di seguire tali indicazioni.

Nome e Cognome

(stampatello)

Firma _____

Data _____





La vostra prescrizione

ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus
o ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM
with HYDRACLEAR® Plus

Lente destra

Gradazione e curva base

Lente sinistra

Gradazione e curva base

VI SONO STATE PRESCRITTE LENTI ACUVUE® OASYS™ con HYDRACLEAR® Plus o ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR®.

LE LENTI DEVONO ESSERE SOSTITUITE SECONDO LE INDICAZIONI DEL VOSTRO SPECIALISTA.

TRATTAMENTO DELLE LENTI

In caso di dubbi o domande, contattare il vostro specialista.

Indirizzo e numero di telefono del vostro specialista

.....
.....

Regolari visite presso il vostro specialista sono importanti per garantire occhi sani e vista nitida.

Programma visite:

1	2	3
4	5	6